

孕婦乙型鏈球菌篩檢檢體

1 採檢容器：

細菌培養用採檢拭子（非營養之傳送培養基，如 Stuart' s 或 Amies）。

2 採檢時機：

懷孕 35~37 週之孕婦。

3 步驟：

1. 取一細菌培養用採檢拭子，清楚標示受檢者姓名、病歷號；檢驗單應註明乙型鏈球菌篩檢培養。
2. 請孕婦平躺雙腳弓起，將採檢拭子置放入孕婦陰道口內約 2 公分處，採集黏膜分泌物（勿使用窺陰器）。
3. 使用同一採檢拭子，置放入孕婦肛門口內約 2.5 公分處，以旋轉之方式採集檢體。
4. 將採檢拭子放回採集容器中。
5. 儘速送檢。

4 檢體保存條件

如無法馬上送檢，於 4℃ 下可保存 24 小時。