

小兒試管 正確採集

輕鬆不費力 檢驗最給力

台大醫院檢驗醫學部
+ NTUH LAB

小藍頭

- PT/aPTT採血量0.9mL
(至黑色刻度線)

※逕洽檢醫部東址受理處請領



小紫頭

- CBC採血量0.25mL
(至250刻度線)
- CBC+DC採血量0.5mL
(至500刻度線)

※逕洽醫材倉庫請領



黃頭管

- 生化檢驗
- 建議採血量1mL
(依據檢驗醫令數量多寡
略有不同)

※使用現行試管

