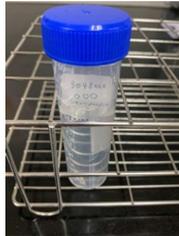


1. 病理部位於東址診療大樓 3 樓

檢體受理處/分機	服務時間	醫令代碼	檢體種類	固定液及送檢須知 註:固定液需大於檢體體積 7-10 倍 註:勿使檢體於變形的狀態下固定	檢體瓶(袋)註:外袋皆以專用塑膠袋打包,放入第二容器傳送,見第 8 點	運送溫度	報告時效
收件室 03-82 室 /265474 、 265473	週一至週六 8:00-17:00	25001C0W 25002C0W 25003C0W 25004C0W 25024C0W 25025C0W	一般性檢體 註:檢體種類見附件 一醫令代碼與診療 項目對照表	小件檢體、膽囊、闌尾、乳房檢體加 10% Formalin 。 註:≤3 cm 為小件檢體 註:膽囊不論大小,建議需沿縱軸剪開加固定液 註:乳房檢體不論大小,需立即加固定液,並於委託單註明採檢時間及固定時間	依大小使用 1. 紅頭迷你罐 	常溫	簡單小件檢體: 3 個工作天 大件、複雜性、困難例、需經脫鈣處理或需染色輔助診斷檢體: 7 個工作天。 註 1: 15:30 以前送達本部者,隔天為第一個工作天。 15:30 以後送達本部者,相當於隔日送至本部,後天為第一個工作天。
		25004C0W	Bone marrow	10% Formalin	2. 紅頭小罐 	常溫,檢體離開冷藏後盡速送檢。	
							常溫

		25004C0W	kidney biopsy	不需加固定液，至送檢前應保存於冷藏，且至檢體取下後應盡速送檢。	3. 白色中罐 	常溫。傳送時間大於兩小時請以冰塊運送 <small>註:溫度監控以開啟第二容器冰塊是否溶化判定。</small>	例如: 禮拜二 15:30 以前送達本部，禮拜三為第一個工作天。禮拜二 15:30 以後送達本部，相當於禮拜三送達，則禮拜四為第一個工作天。 <small>註 2: 若遇院內行事曆紅字，則為非工作天。禮拜六、日為非工作天。</small>
		25024C0W	testis biopsy	Bouin	4. 院內一般垃圾塑膠袋	常溫	
		25006B0W	frozen section	不需加固定液 <small>註: 骨頭、牙齒、Lymphoma、活動性肺結核、HIV、Prion 檢體，因檢驗方法限制無法檢測</small>		常溫 <small>註: 立即運送</small>	
		25009B0W	muscle biopsy	不需加固定液。採檢後立即以液態氮不加 OCT 方式來急凍檢體，以保存酵素活性及減少冰晶。	自備保冰容器	液態氮	
		25014B0W	電子顯微鏡檢查	2.5% Glutaraldehyde <small>註: 需預先至東址三樓病理部 gross room 索取固定液</small>	黑頭迷你罐 	常溫	

細胞 室 03-83 /263965	週一至週 五 8:00-17:00	330W 15017C0W W0379 15017CZW 15021CYW	子宮頸抹片	95%酒精 (35ml 以上)	 <p>同時有多診間檢瓶蓋上請註明診間號碼，全部依委託單次序排列置於試管架上，無須用專用塑膠袋打包。</p>	常溫	<p>優先篩檢件：健檢、住院及臨床單位要求等。報告發出時間為三個工作天內。</p> <p>一般篩檢件：婦產部門診、腫瘤部門診、家醫部癌篩、景福門診、國際醫療、北護分院及金山分院。報告發出時間為十四個工作天內。</p> <p>註 1:</p>
		W0380	婦科液態薄層細胞抹片	PreservCyt® Solution vial(檢體瓶)	 <p>以檢體夾鏈塑膠袋打包。</p>	常溫	<p>14：00 以前送達本部細胞室者，隔天為第一個工作天。14：00 以後送達者，相當於隔日送件，後天為第一個工作天。</p> <p>註 2: 禮拜六、日及國定假日為非工作天。</p>

		25004C0W	體液細胞蠟塊(Cell block)檢查	<p>所需檢體量約 300ml 分 6 管裝。每管應添加 1ml Heparin 防止凝固，不需加固定液。檢體取下後應盡速送檢，若無法於收件時間送達請置於冰箱冷藏。</p>	 <p>同一般外科病理檢體打包</p>	<p>常溫</p> <p>無加染其他染色輔助診斷檢體： 2 個工作天，第 3 天可查詢報告 困難例、需染色輔助診斷檢體： 至多 7 個工作天，第 8 天可查詢報告</p> <p>註 1: 同一部位體液檢體須半年內已有 Atypia 以上診斷之細胞學檢查報告。細胞學結果懷疑血液腫瘤需再有體液 flow cytometry 陽性報告。 註 2: 當日收件時間為下午 3 點以前；若須加染 Her-2/neu 免疫染色，應於中午 12 點以前送達，逾時則隔日收件登錄。收件隔日為第一個工作天。 註 3: 若遇院內行事曆</p>
--	--	----------	----------------------	--	---	---

							紅字，則為非工作天。 禮拜六、日為非工作天。
血液病 染色體 室 03-86 室 /265452	週一至週 六 8:00- 17:00	25007BZW	骨髓 周邊血 體液 組織	以 20ml 含 Heparin 無菌針筒抽取骨髓檢體，至少須 10ml，周邊血檢體則需 15ml，體液至少 10ml，組織泡於 Normal saline(或 RPMI medium)無菌容器中至少大於 1 立方公分常溫送檢，若無法當天送達，則先冷藏於該單位後隔日室溫送檢。	骨髓：20ml 含 Heparin 無菌針筒 周邊血：同上或 Heparin 綠頭管 體液：含 Heparin 之無菌容器	常溫	28 個日曆天 週六與國定假日不收件
		25007BYW	骨髓 周邊血	常溫送檢；骨髓檢體須 10ml，周邊血檢體需 15ml	同上	常溫	21 個日曆天 週六與國定假日不收件
分子病 理室 03- 74& 03- 84 室	週一至週 五 8:00- 17:00	30101B00	福馬林固定 後石蠟包埋 之腫瘤組織	脫鈣檢體無法檢測，偵測極限為 10% tumor mutation level (5% allele frequency)	N/A	N/A	7 個工作天
		12195B0W		脫鈣檢體與可判讀之腫瘤細胞 < 20 顆無法檢測	N/A	N/A	7 個工作天

		000W0404-406; 000W0388-389		脫鈣檢體無法檢測，偵測極限為 10% tumor mutation level (5% allele frequency)	N/A	N/A	10 個工作天
		000W0390-395		脫鈣檢體無法檢測，偵測極限為 10% tumor mutation level (5% allele frequency)	N/A	N/A	14 個工作天
		000W0396		脫鈣檢體與可判讀之腫瘤細胞<100 顆無法檢測	N/A	N/A	14 個工作天
		000W0397, 000W0407, 000W0409		可判讀之腫瘤細胞<100 顆無法檢測	N/A	N/A	14 個工作天
		000W0408		可判讀之腫瘤細胞<100 顆無法檢測	N/A	N/A	14 個工作天
		000W0410		脫鈣檢體無法檢測，偵測極限為 10% tumor mutation level (5% allele frequency)	N/A	N/A	10 個工作天
		000W0411-413		可判讀之腫瘤細胞<200 顆無法檢測	N/A	N/A	7 個工作天
		000W0414		可判讀之腫瘤細胞<100 顆無法檢測	N/A	N/A	7 個工作天

<p>解剖室 265481</p>	<p>週一至週 五 8:00- 17:00 註:須 事前電話聯繫 65481 或 65463</p>	<p>由臨床醫師 提出申請</p>	<p>具研究價值 之院內死亡 病例</p>	<p>高度傳染性之危險、游離輻 射污染或涉及醫糾、刑事等 法律問題者，無法受理病理 解剖之申請。胎兒不足 500 公克或僅要求局部採樣者亦 不宜接受並理解剖。</p>	<p>N/A</p>	<p>常溫</p>	<p>無特別規範，但解剖報 告於 6 個月內完成。</p>
-----------------------	--	-----------------------	-------------------------------	---	------------	-----------	-----------------------------------